

START LYT DIREKTE

I iPhone findes en mulighed for at bruge mobiltelefonen som en mikrofon og streame lyden direkte ind i høreapparaterne.

- Gå til Indstillinger → Tilgængelighed → Høreapparater. Vælg høreapparaterne, og tryk på "Start Lyt direkte".
- Lyt direkte kan også aktiveres ved at trykke 3 gange hurtigt på hjem-knappen

FEJLSØGNING

Hvis du oplever problemer med parring

- Kontrollér, at Bluetooth er slået til, og at høreapparaterne er i nærheden af mobiltelefonen
- Udskift batterierne i høreapparaterne
- Genstart høreapparaterne ved at åbne og lukke batteridørene. Parringen med høreapparaterne skal ske inden for 3 minutter
- Aktivér og deaktivér flyfunktion
- Sørg for, at EVOKE APP har adgang til Bluetooth ved at gå til Indstillinger > EVOKE og slå Bluetooth til

Hvis det stadigvæk ikke fungerer, prøv følgende:

- 1 Annuller parringen ved at gå til Indstillinger → Tilgængelighed → Høreapparater. Vælg høreapparaterne, og tryk på "Glem denne enhed"
- 2 Luk EVOKE APP, hvis den er åben
- 3 Genstart mobiltelefonen
- 4 Genstart høreapparaterne og forsøg parring forfra

Hvis du oplever problemer med streaming af lyd, prøv følgende:

- Kontrollér, at høreapparaterne er parret med mobiltelefonen
- Gå til Indstillinger → Tilgængelighed → Høreapparater → Lydrute. Kontrollér, at Lyd fra opkald og Lyd fra medier begge er indstillet til "Automatisk" eller "Altid høreapparater"
- Aktivér og deaktivér flyfunktion
- Slå WI-FI fra på mobiltelefonen

FOR MERE **SUPPORT**:
www.widex.dk/evoke-support

LISTE OVER **KOMPATIBLE** TELEFONER:
www.widex.dk/kompatibilitet


TIPS OG NYHEDER SENDT **DIREKTE TIL DIG**:
www.widex.dk/nyhedsbrev

WIDEX TV PLAY™

Med den prisbelønnede WIDEX TV PLAY™ kan du streame enestående stereolyd direkte fra dit TV til dine høreapparater. TV PLAY kan bl.a. justeres fra EVOKE APP.



QUICK GUIDE EVOKE™ APP

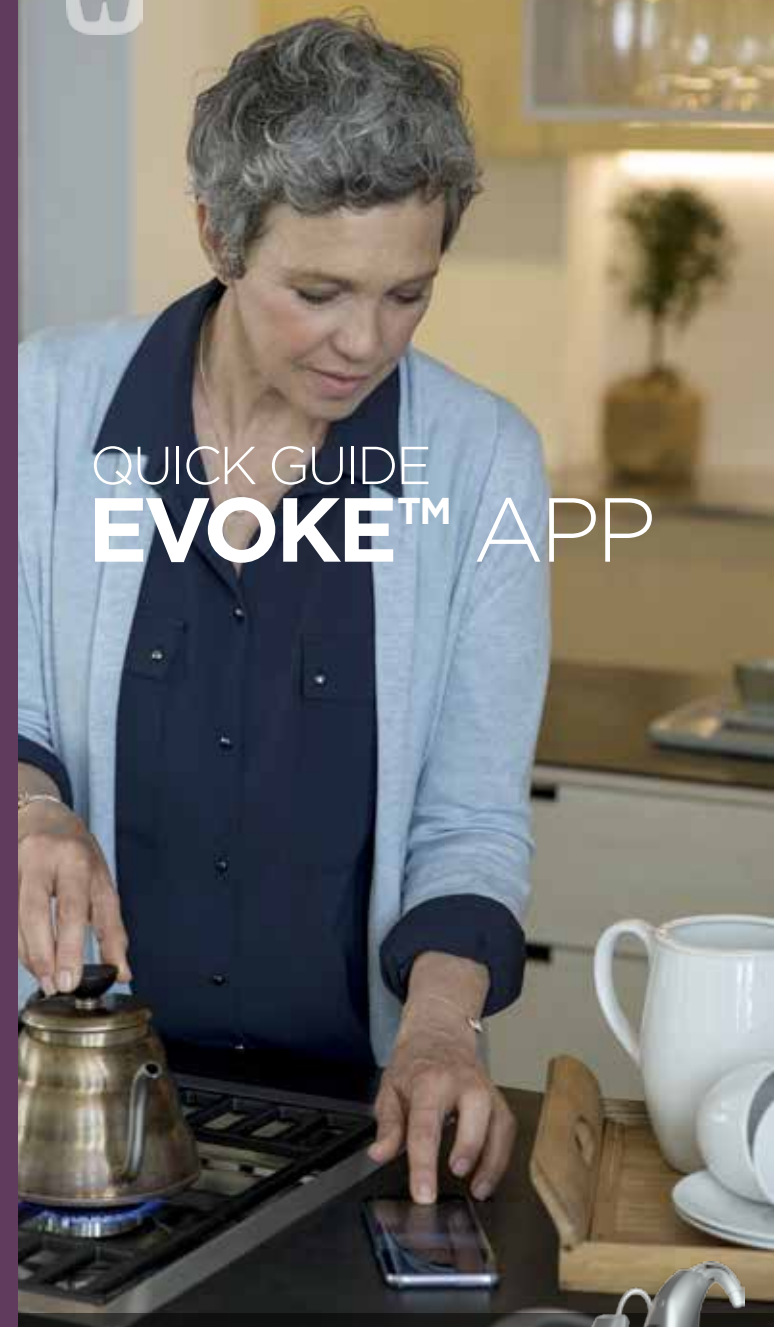

WIDEX EVOKE™
HEARING HAS EVOLVED

2019-11 / 9 504 1016 010 04

WIDEX EVOKE™
HEARING HAS EVOLVED



KOM GODT I GANG

EVOKE APP anvendes med WIDEX EVOKE™ Bluetooth-høreapparater og fungerer med både iPhone og Android.



Du kan streame samtaler og musik direkte fra din iPhone til dine høreapparater. Hvis du har en Android-telefon, kan du streamer med en WIDEX COM-DEX.

Download EVOKE appen fra App Store eller Google Play.

PARRING AF EVOKE MED TELEFONEN

APPLE iOS

- 1 Slå Bluetooth til
- 2 Gå til Indstillinger → Tilgængelighed → Høreapparater
- 3 Genstart høreapparaterne ved at åbne og lukke batteridørene
- 4 Vælg høreapparaterne, og tryk på "Dan par"
- 5 Høreapparaterne er nu parret med telefonen, og du kan åbne EVOKE APP

ANDROID

- 1 Gå til Indstillinger og slå Bluetooth til.
- 2 Genstart høreapparaterne ved at åbne og lukke batteridørene
- 3 Tryk på høreapparaterne, der bliver vist under "Tilgængelige enheder"
- 4 Høreapparaterne er nu parret med telefonen, og du kan åbne EVOKE APP

HOLD DIG OPDATERET

Der kommer jævnligt opdateringer til dine høreapparater og telefon. Når det sker, bliver du automatisk spurgt om at opdatere i telefonen og/eller appen. Det er vigtigt, at du accepterer opdateringer, så du altid har de nyeste funktioner installeret.

Nogle opdateringer kan have indflydelse på, hvordan du parrer og bruger dine høreapparater og app med din telefon. For at holde dig informeret om opdateringer som kan påvirke dig, anbefaler vi, at du tilmelder dig vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevet indeholder gode råd og nyheder om høretab og høreapparater. Efter du har tilmeldt dig, kan du til enhver tid afmelde dig igen.

Gå til www.widex.dk/nyhedsbrev

EVOKE APP OVERSICHT

- Menu
- Batteristatus/Hjælp
- Valgt program
- Swipe for at vælge program
- Slå mikrofonerne fra i høreapparaterne
- Lydstyrkeregulering
- Lydmenu
 - SoundSense Learn
 - Equalizer
 - Venstre/højre lydstyrke



REAL-LIFE INSIGHTS DATA

I EVOKE APP 1.4 og nyere bliver du, første gang du åbner appen, spurgt om samtykke til at dele data. Denne data giver din høreklinik adgang til at se dine justeringer foretaget med appen. På den måde kan høreapparaterne tilpasses endnu bedre til dig.

Datadelingen er udelukkende et værktøj til at kunne forbedre din lytteoplevelse og hjælper til udviklingen af nye høreapparater. Al data er krypteret, og der gives ikke adgang til identificerende data.

DESIGN DIN EGEN HØRELSE

Er du ikke tilfreds med lyden, kan du simpelt justere til netop dine præferencer. Dine justeringer kommer ikke til at slette eller ændre, hvad audiologen allerede har gjort. I stedet lægger du dit eget personlige lag ovenpå.

Her kan du se dine justeringsmuligheder:


SOUNDSENSE LEARN

SoundSense Learn bygger på Machine Learning og guider dig intelligent til at forbedre dine lytteoplevelser.

Lyt til de to lydprofiler, A og B, og vælg med den blå slider, hvilken du foretrækker. Når du trykker "Næste", kommer to nye lydprofiler op baseret på dit valg.

Fortsæt sådan, indtil du er tilfreds, og tryk "AFSLUT". Du kan herefter gemme dine justeringer som et fast program

(Gå til Lydmenu → SoundSense Learn)

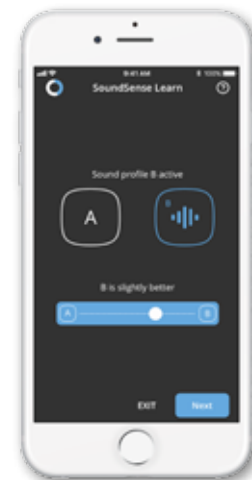

ANDRE FUNKTIONER

- **Equalizer:**
Juster lyden i bas-, mellemtone- og diskantområdet for at få en mere personlig lyd (Gå til Lydmenu → Equalizer)
- **Retningsbestemt fokus:**
Vælg retning for mikrofonerne i høreapparatet (Ligger som program på forsiden)
- **Lydmixer:**
Vælg om høreapparaterne skal fokusere på omgivelser eller streaming (Kun synligt ved streaming)
- **H/V-lydstyrke:**
Juster lydstyrken individuelt for høreapparaterne (Gå til Lydmenu → Højre/venstre lydstyrke)

PERSONLIGE PROGRAMMER

Når du finder en justering, som du er tilfreds med, kan du gemme den ved at vælge "Gem som" i lydmenuen. Herefter kan du navngive programmet, og ved at trykke på de tre "prikker" øverst i lydmenuen kan du bl.a. tilføje lokalitet, så programmet automatisk bliver valgt, når du besøger en bestemt lokation.